

De CRDL



Wat is het?

De CRDL is een ovaalvormig object van ultra-glad walnoten hout, dat zowel op tafel als comfortabel op schoot geplaatst kan worden. Het nodig uit om aangeraakt te worden. In de houten behuizing van ongeveer 40 cm lang, zit software verborgen. De technologie achter het product is niet zichtbaar. De CRDL vertaalt aanraking in geluid en wordt standaard geleverd met 25 verschillende geluiden. De manier van aanraken is van invloed op het geluid dat wordt voortgebracht: vasthouden, strelen, kloppen, tikken of kriebelen. Door het menselijk lichaam in te zetten als onderdeel van de besturing, bespelen gebruikers niet zozeer het instrument maar elkaar.

Voor wie?

Dit product is geschikt voor met mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking en voor mensen met een visuele beperking.


Voor wie is het niet geschikt?

Dit product is niet geschikt voor mensen die doof zijn of doofblind.

Wat is het doel?

Het behouden van menselijke waarde en persoonlijke aandacht.

De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefenen op de interactie.

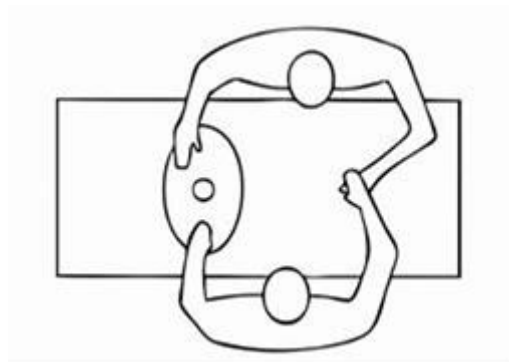

Gebruikersgemak

Aan de achterkant van de CRDL zit een lusje. Wanneer je deze aantrekt gaat een klepje open. Wanneer het lampje rood brandt, is de CRDL leeg. Je laadt de CRDL op door de kant van de oplader met de markering naar boven in de meest linker opening te pluggen. Het ronde knopje aan de rechterkant van de CRDL is de aan-uit knop. Het smalle langwerpige knopje (middelste) schuif je naar links of rechts om het volume te regelen. Door deze middelste knop in te duwen verander je van geluidsbibliotheek. Via een SD-kaart kun je eigen muziek op de CRDL zetten.


Klaarmaken voor gebruik

Zorg dat de CRDL is opgeladen. Trek aan het lusje op de achterkant. Druk op de rechter knopje en wacht 15 seconden totdat het opstartgeluid hoorbaar is. Vervolgens kun je de CRDL afstellen op het geluid dat je graag wilt horen. De interactie begint wanneer twee gebruikers ieder één hand op de CRDL leggen en een circuit vormen door elkaar aan te raken of door meerdere deelnemers aan het circuit toe te voegen, als schakels in een ketting.

Aan de slag

Opdracht 1

Maak met een andere gebruiker contact en raak de CRDL aan.

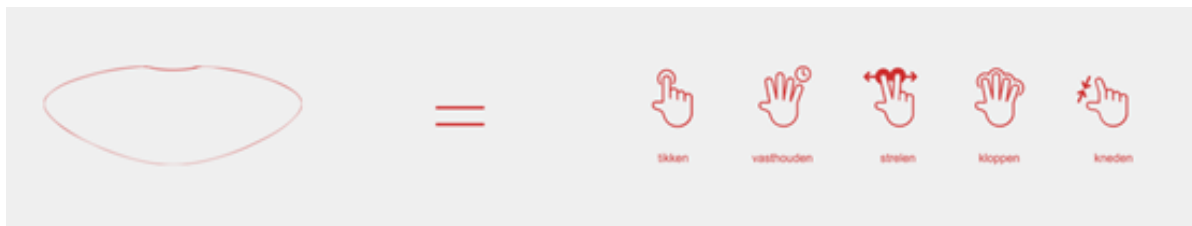

Gebruik bij deze oefening de opdrachten van het plaatje hierboven. Wat gebeurt er en hoe ervaar jij dit.

Opdracht 2

Kijk of je verschil ziet in reactie bij de cliënten, wanneer je het geluid van muziekinstrumenten of dieren gebruikt.

Instructiefilm

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0%3Dhttps%253A%252F%252Fi.vimeocdn.com%252Fvideo%252F607683473_1280x720.jpg%26src1%3Dhttps%253A%252F%252Ff.vimeocdn.com%252Fimages_v6%252Fshare%252Fplay_icon_overlay.png&imgrefurl=https://vimeo.com/195448992&tbnid=IxMCv5E1pqeJP_M&vet=1&docid=o6x8Y7CeOU5XHM&w=1280&h=720&q=crdl+instructie&hl=nl-nl&source=sh/x/im